

RESTORATIVE

TÉMOIGNAGES



UNE HISTOIRE DE TDAH

« MADAME, JE PEUX ALLER AUX TOILETTES ? »

LES DIFFICULTÉS DE LÉO (7 ANS) À RESTER CONCENTRÉ

Les débuts

Léo a 7 ans et est scolarisé à l'école primaire. Il a reçu un diagnostic de TDAH. Ses parents décrivent un enfant inattentif et désorganisé. Il a du mal à se concentrer et à socialiser avec les autres enfants.

À l'école, même lorsqu'il parvient à rester assis plus de 5 minutes, il demande sans cesse à boire, à aller aux toilettes ou à tailler ses crayons.

Cognitive profile and diagnostic assessment

Les résultats du test WISC-IV* de Léo indiquent des capacités générales dans la norme, mais une mémoire de travail et une vitesse de traitement en dessous de la moyenne. Ses résultats aux tests Campanelle** et BIA-R** sont inférieurs au 5e percentile pour la vitesse de traitement et pour

plusieurs indicateurs des fonctions attentionnelles.

Plan de traitement




L'équipe médicale de Léo décide d'introduire un cycle de MindLenses Professional – un dispositif médical innovant et une thérapie numérique pour le TDAH – dans son plan de soins.

MindLenses en bref

L'équipe médicale de Léo décide d'introduire un cycle de MindLenses Professional – un dispositif médical innovant et une thérapie numérique pour le TDAH – dans son plan de soins.

*Échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants : un test mesurant les capacités intellectuelles des enfants âgés de 6 à 16 ans.

**Batteries de tests TDAH spécifiques à la langue italienne.

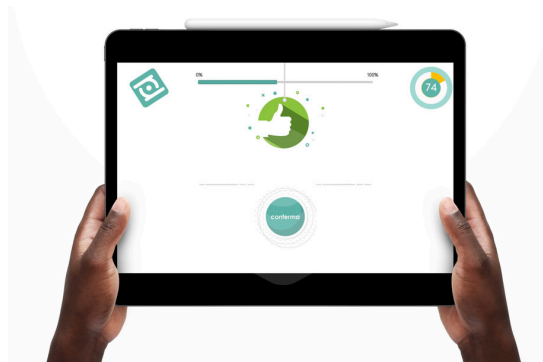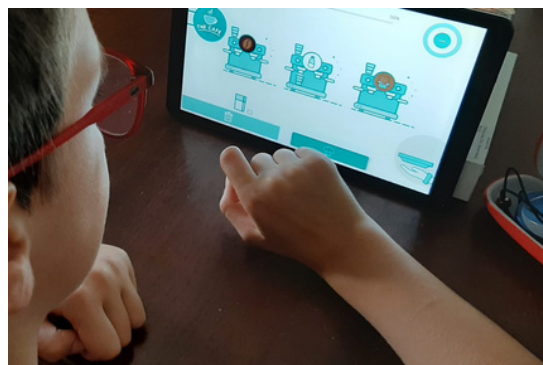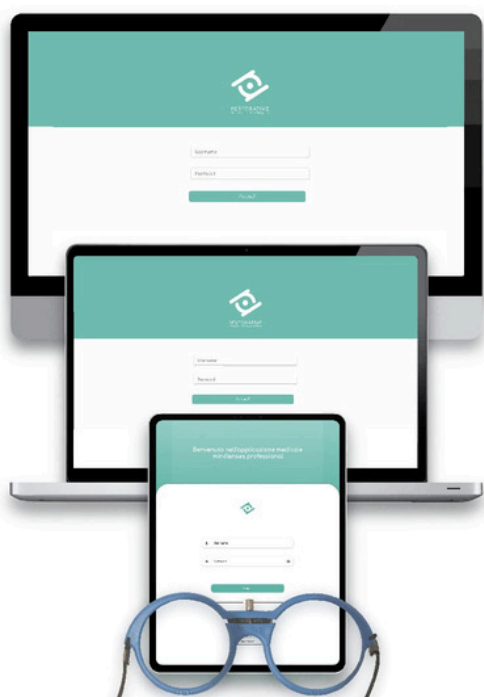

LES RÉSULTATS DU TRAITEMENT COGNITIF

« NOUS AVONS RÉUSSI À FAIRE NOS DEVOIRS PLUS LONGTEMPS »

Évaluation cognitive avec MindLenses

Avant le traitement, Giacomo effectue la batterie de tests standard MindLenses. Les tests MindLenses n'ont pas de visée diagnostique, mais servent à établir une référence et à évaluer quantitativement les résultats du traitement.

Traitement

Le traitement MindLenses comprend 10 séances quotidiennes d'environ 40 minutes chacune. Les séances commencent par le protocole de neuromodulation, suivi de jeux sérieux ciblant des fonctions attentionnelles spécifiques. La réponse de Giacomo à la thérapie, ainsi que son adhésion et sa motivation, sont satisfaisantes.

Résultats

Après le traitement, les scores de Giacomo montrent des améliorations significatives par rapport à avant le traitement.

D'un point de vue qualitatif, les parents de Giacomo rapportent une amélioration générale de sa capacité à rester concentré, avec un impact direct sur les activités quotidiennes comme rester assis pour faire ses devoirs pendant une période plus longue.

Ce témoignage de patient provient de l'unité de neuropsychiatrie infantile de l'hôpital Policlinico Umberto I de Rome, en Italie. MindLenses Professional est conçu et produit par Restorative Neurotechnologies Srl.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I

